


MANUAL DO USUÁRIO

ATENÇÃO: Não deixe de ler todas as informações e instruções antes de usar!

- ▲ O Quick Bar não é projetado para apoiar o peso de seu corpo inteiro.
- ▲ Foi projetado para ajudar o seu movimento natural, como quando pisar para dentro ou fora de um chuveiro.
- ▲ Sempre verifique as condições de retenção das ventosas através das janelas, a cada utilização.
- ▲ Não instalar em superfícies móveis.
- ▲ Tração Máxima: 63,5 Kg (Horizontal e Vertical); 31,75 Kg (angulado).

Ele é projetado para uso somente em superfícies lisas e não porosas, azulejos de face lisa, vidro, porcelana ou fibra de vidro. Não é para uso nas paredes bordadas, madeira, superfícies pintadas, ou com papel de parede.

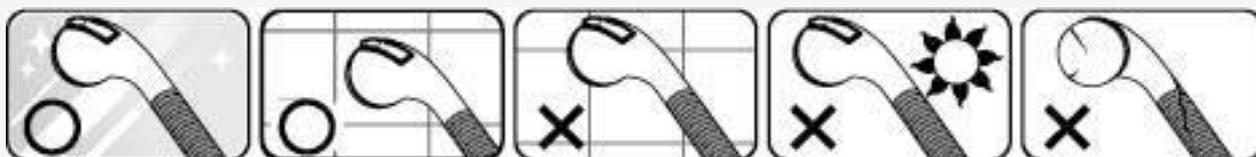

INSTALAÇÃO:


1. Limpe bem a superfície com álcool e deixe secar, verifique a condição das ventosas. Não utilize se estiverem danificadas, rachadas ou muito ressecadas.
2. Elevar ambas as alavancas; colocar o Quick Bar de modo que ambas as ventosas se encontrem firmemente e completamente sobre uma superfície lisa.
3. Pressione o Quick Bar contra a parede com as alavancas elevadas, com a palma da mão abaixe as alavancas.
4. Verificar se nas janelas de cada ventosa encontra-se cem por cento na cor verde.



REMOÇÃO:

1. Levantar uma alavanca de cada vez.
2. Se caso a sucção continuar, levantar delicadamente uma borda com o dedo.
3. Não use um instrumento afiado que possa danificar a ventosa.
4. Sempre manter as alavancas viradas para cima até a próxima utilização.

INDICADOR DE ASPIRAÇÃO PATENTEADO "**VERDE**" significa a correta fixação, caso contrário, ele vai se transformar na cor "**VERMELHA**" que significa para reinstalar ou verificar a superfície de montagem. Não instale sobre locais com articulações ou paredes de gesso.

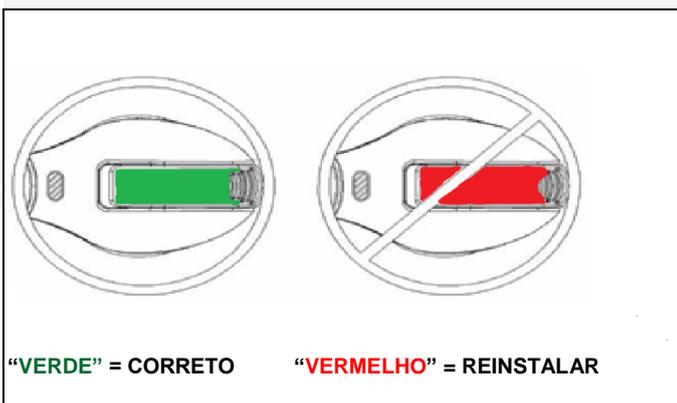

Contato para aquisição:
Panamedical Sistemas Ltda.
Rua Borges Lagoa, 423 – Vila Clementino
04.038-030 – São Paulo/SP
Tel.: (11)2344-1900 / Fax: (11)5575-2953
www.panamedical.com.br / panamedical@panamedical.com.br



30 F-2, NO.159, Song de Road
Taipei, 110, Taiwan - R.O.C
TEL: 886-2-2346.2319
FAX: 886-2-2346-6942
unitrend@unitrend.com.tw